

Vasconcellos<sup>®</sup>



LÁSER CO2  
PORTABLE


VASCONCELLOS

## ¿Para qué sirve el Láser CO2?

La evidencia científica deja claro que hoy por hoy el láser de elección para tratamientos ginecológicos es el CO2.

En concreto en ginecología, es uno de los pocos que aparecen en los estudios científicos, estos cada vez demuestran la eficacia de los láseres de CO2.

Las Aplicaciones del Láser de CO2 se pueden utilizar en la Ginecología, Ginecoestética y Ginecología Regenerativa.

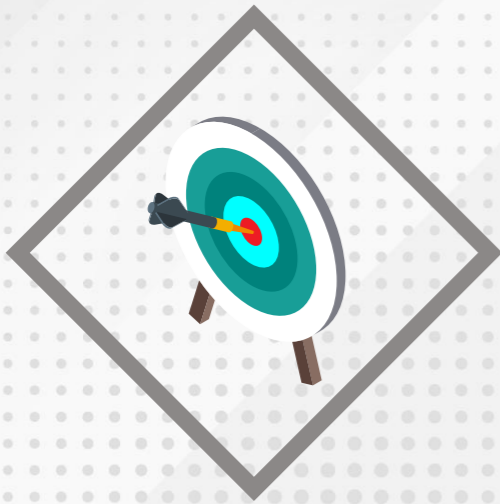

PRECISO



EFICAZ




SEGURO



DURADERO

Sus Aplicaciones Principales Son:

- Atrofia Vaginal
- Incontinencia Urinaria
- Hiperlaxitud o Relajación Vaginal
- Liquen Escleroso
- Eliminación de Verrugas Genitales
- Vaporización de Cervicitis, Ectopias
- Displasias de Cérvix
- Prolapsos Genitales
- Blanqueamiento Genital
- Tratamiento de Infecciones Vaginales de Repetición
- Cirugía Íntima Femenina

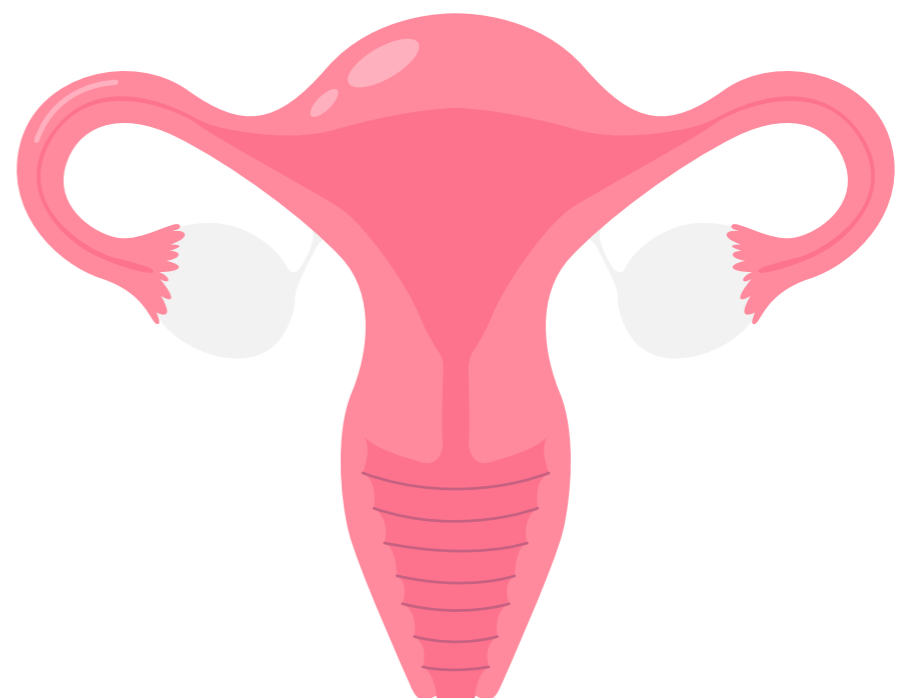

## MODO FRACCIONAL (ESTÉTICO)

### Aplicaciones del modo Fraccional

Contracción de colágeno y remodelado  
Estiramiento de la piel, elimina cicatrices,  
cicatrices de acné, cicatrices de  
quemaduras, cicatrices de cirugía, etc.  
Elimina arrugas, estrías, manchas  
de la edad, pecas, verrugas, etc.




LÁPIZ



### Aplicaciones del modo Pulsado

Solo se ocupa con la pieza  
de mano o lápiz , en este modo  
siempre es recomendable  
empezar con la potencia  
mínima e ir subiendo  
dependiendo la situación  
de la cirugía que se realice

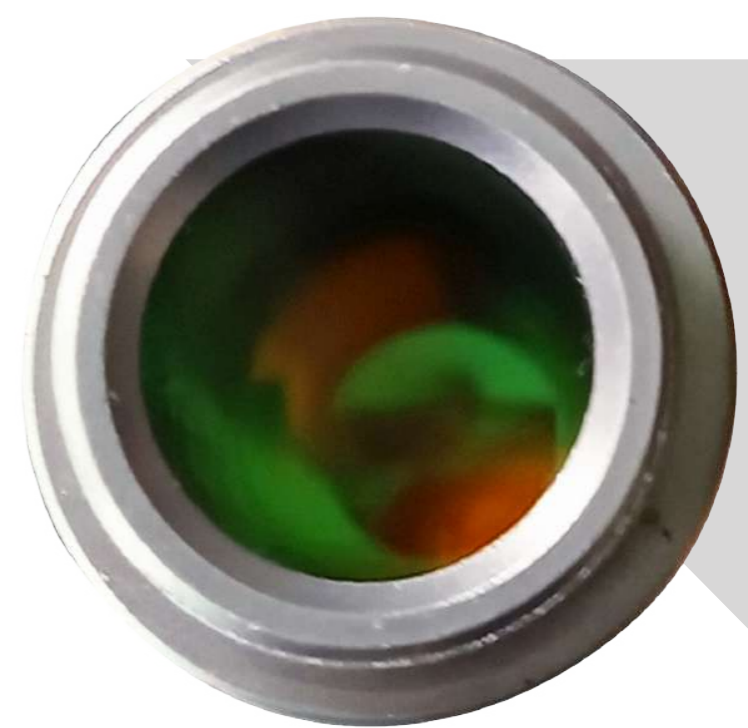

LENTE AMBAR

## MODO PULSADO (CIRUGÍA)

## MODO GYN (GINECOLÓGICO)



ADITAMENTOS GINECOLÓGICOS



90°



360°

## Aplicaciones del modo GYN (Vaginal)

- Atrofia Vaginal
- Incontinencia Urinaria
- Eliminación de Verrugas Genitales
- Vaporización de Cervicitis, Ectopias
- Blanqueamiento Genital
- Tratamiento de Infecciones Vaginales de Repetición
- Cirugía Íntima Femenina
- Displasias de Cérvix
- Prolapsos Genitales

# CONSEJOS PARA EL BUEN USO DEL LÁSER

## MANERAL TIPO LÁPIZ

El modo Pulsado y continuo únicamente se utiliza con la pieza de mano o lápiz.




La pieza de mano o lápiz debe esterilizarse en cada uso

El lente ambar que se encuentra en la parte superior, por ningún motivo debe mojarse por ninguna situación, se recomienda limpiarlo con un paño seco



La potencia del láser se recomienda ser utilizada de menor a mayor ya que esta puede provocar lesiones a tu paciente

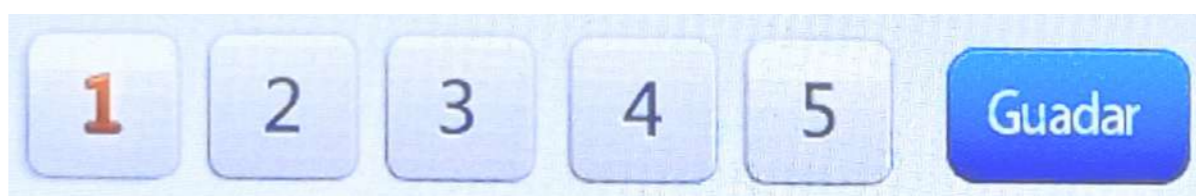

Su software permite guardar 5 parámetros distintos para sus tratamientos

# Vasconcellos<sup>®</sup>



LÁSER CO2  
*portable*



 Tel: 55 7822 8045

 Cel: 55 8300 8832

 [vasconcellosventas@gmail.com](mailto:vasconcellosventas@gmail.com)

 [www.vasconcellos.com.mx](http://www.vasconcellos.com.mx)